

HUSK!


- at løsne bøjlen fra sengegavlen inden du tager/løfter flasken.




HUSK!

- at når du skal flytte flasken sidelæns på sengegavlen skal du løfte den.

På grund af den skridsikre overfladebehandling skal flasken løftes og ikke skubbes, hvis den skal flyttes på sengegavlen.

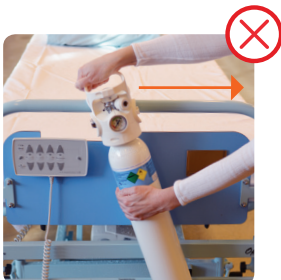

1) Løft op

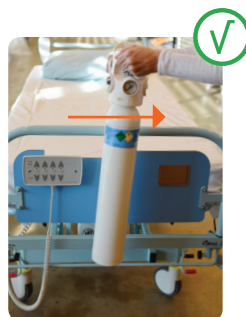

2) Flyt flasken



3) Sæt den fast på sengen igen

HUSK!

- at skubbe bøjlen i låst position når flasken skal returneres.



HUSK!

- at behandle flaske og bøjle ansvarligt, det er også din sikkerhed det handler om.

STRANDMØLLEN

STRANDMØLLEN A/S
Strandvejen 895
DK - 2930 Klampenborg

Telefon 701 02 107
Fax 701 03 107

A/S REG. NR. 188.220
CVR. NR. 13 91 30 72