



CO₂ PHARMA LINE® >99,5% – MDR TIL LAPAROSKOPI

God praksis for håndtering og opbevaring i lagerrummet

GOD PRAKSIS I LAGERRUMMET

Fra 1. oktober 2025 leveres CO₂ PHARMA LINE >99,5% – MDR til laparoskopiske procedurer. Det stiller særlige krav til opbevaring og håndtering i lagerrummet. Derfor har vi udarbejdet en række anbefalinger.

SKELN MELLEM DE TO TYPER CO₂

- CO₂ PHARMA LINE >99,5% – MDR: skal anvendes ved laparoskopiske procedurer og er mærket med UDI på flasken.
- CO₂ Ph. Eur. PHARMA LINE: kan anvendes til øvrige procedurer og er uden UDI.

OPBEVAR FLASKERNE ADSKILT OG TYDELIGT MÆRKET

- Sørg for en dedikeret og tydeligt mærket sektion i lagerrummet til MDR-flasker. Adskillelse anbefales for at reducere risikoen for fejl, men er ikke et krav.
- Brug skilte, farvekoder eller kasser for at undgå forveksling.

INFORMÉR OG INSTRUÉR PERSONALE

- Alle, der håndterer flaskerne, skal være informeret om, at der nu skelnes mellem CO₂ til laparoskopi og til øvrige procedurer.



TJEKLISTE FOR LAGERHÅNDTERING

- ☐ Er flaskerne tydeligt mærket med korrekt produktnavn?
- ☐ Er CO₂ PHARMA LINE >99,5% MDR placeret adskilt og tydeligt markeret?
- ☐ Er FEFO-princippet (First Expired, First Out) fulgt?
- ☐ Er modtagelse og udlevering registreret?
- ☐ Har alle involverede fået information om forskellen på produkterne?





ESSENTIEL FOR FREMTIDEN

**Hos Strandmøllen får du
mere end bare gas**

Du får løsninger, som gør en forskel hver gang, vi bliver klogere, siger tak for mad, ser græsset gro, finder nye veje, smelter sammen, og trækker vejret. Du møder fagfolk, som med omtanke, erfaring, viden og passion forstår kompleksiteten i din hverdag, og som med den sikreste hånd kan gøre en forskel i sundhedsvæsenet, farmaindustrien, jern- og maskinindustrien, fødevareindustrien, i laboratorierne, for udvikling af ny energi og vores fælles bæredygtige fremtid.

STRANDMØLLEN A/S

Strandvejen 895
DK-2930 Klampenborg

Tlf. 701 02 107
www.strandmollen.dk
kundeservice@strandmollen.dk

STRANDMØLLEN

